

## • REFERENCIA: 710.00

### Funda para sonda de ecógrafo no lubricada



#### Denominación

Funda para sonda de ecógrafo de látex no lubricada, y de un solo uso.

#### Conformidad

Certificación ISO: Oiarso, S. Coop (Bexen medical®) tiene implementado y mantiene un sistema de calidad conforme a las exigencias de las Normas ISO 9001 e ISO 13485.

Marcado CE según la Directiva Europea 93/42/CEE.

Testado electrónicamente y conforme a las normas ISO 4074 y EN 600.

#### Utilización

Funda protectora para sondas de ecógrafo de un solo uso. Garantizan la asepsia a la hora de realizar ecografías vaginales.

#### Características

<b>Textura</b>	Látex
<b>Longitud</b>	180-190 mm
<b>Diámetro</b>	52±2 mm
<b>Espesor</b>	0,065±0,015 mm
<b>Color</b>	Color natural

#### Materiales utilizados

Funda	Látex
-------	-------

#### Presentación

Unidad de empleo: Envase rasgable.

Presentación: caja de 72 unidades.

Periodo de caducidad: 5 años desde la fecha de fabricación

#### Modo de empleo

- 1) Antes de su utilización: Verifique la fecha de caducidad impresa en el envase.
- 2) En el momento de la apertura: Rasgue con cuidado el embalaje (no utilice los dientes, las uñas u objetos cortantes).
- 3) Verifique que la funda está orientada en el sentido correcto.
- 4) Desenrolle la funda en toda su longitud sobre la sonda.
- 5) Después de terminar la exploración, retire la funda.
- 6) Deposite la funda en la basura (evite arrojarlo al váter)

Ref.	Gama	Lubricada	Código de barra Envase unitario (EAN 13)	Código de barra caja (DUN14)
710.00	Standard	no	8427860710009	18427860710006

FABRICANTE	EC REP
PLEASURE LATEX PRODUCT SDN.BHD. Jalan Padang Gajah, 45800 Jeram, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	Obelis s.a. Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, BELGIUM

DISTRIBUIDOR
Oiarso, S.Coop (Bexen medical®) B° Zikuñaga, 57-F, Pol. Ind. Ibarluze 20120 Hernani (Guipúzcoa) Tel : 943 33 50 20 <a href="http://www.bexenmedical.com">www.bexenmedical.com</a>

